

Information zur Anwendung der Selbsttests

1. Desinfizieren Sie sich die Hände und schnäuzen Sie sich vor der Probenentnahme mehrmals die Nase.
2. Entnehmen Sie das Material aus dem Karton des Testkits.
3. Drücken Sie das Röhrchen in den Röhrchenständer der Verpackung.




4. Öffnen Sie das kleine Fläschchen mit der Flüssigkeit.

VORSICHT: Öffnen Sie es vom Gesicht weg und achten Sie darauf, dass Sie nichts von der Flüssigkeit verschütten.



5. Drücken Sie die gesamte Flüssigkeit in das Röhrchen.

VORSICHT: Vermeiden Sie den Kontakt der beiden Behälter. Achten Sie darauf, dass der Behälter nicht umfällt.

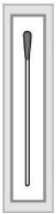

6. Öffnen Sie die Verpackung des Teststäbchens an der gekennzeichneten Seite nur wenige Zentimeter.



7. Ziehen Sie das Teststäbchen vorsichtig aus der Verpackung.

VORSICHT: Berühren Sie die weiche Spitze des Tupfers nicht mit den Händen.

8. Führen Sie den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein. Die Tupferspitze sollte bis zu 2,5 cm tief eingeführt werden. Kreisen Sie mit dem Teststäbchen 3-5 Mal im




gesamten Nasenloch, damit viel Schleimhaut berührt wird. Belassen Sie das Teststäbchen einige Sekunden im Nasenloch. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Teststäbchen im anderen Nasenloch.


VORSICHT: Dies kann sich unangenehm anfühlen. Führen Sie den Tupfer nicht tiefer ein, wenn Sie starken Widerstand oder Schmerzen spüren.




9. Führen Sie das Teststäbchen in das Röhrchen ein. Drehen Sie das Teststäbchen nun 3-5 Mal. **Belassen Sie das Teststäbchen 1 Minute in der Flüssigkeit.**

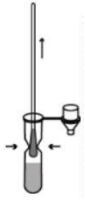


10. Drücken Sie das Röhrchen mit den Fingern zusammen und ziehen Sie das Teststäbchen aus dem Röhrchen heraus. Dabei sollte das Teststäbchen möglichst gut ausgedrückt werden. Entsorgen Sie das Teststäbchen in Ihren Müllbeutel.

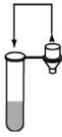

11. Setzen Sie die Abdeckkappe mit dem Tropfaufsatz auf das Röhrchen.

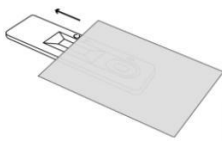

12. Öffnen Sie jetzt die blau-weiße Verpackung und entnehmen Sie die Testkassette. Legen Sie die Testkassette vor sich auf den Tisch **VORSICHT: Nach dem Öffnen muss die Testkassette sofort verwendet werden.**

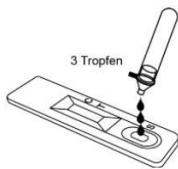


13. Drehen Sie das Röhrchen um und geben Sie 3 Tropfen der Flüssigkeit auf die Probenvertiefung (S), indem Sie das Röhrchen leicht zusammendrücken. **VORSICHT: Die Bildung von Luftblasen in der Probenvertiefung (S) ist zu vermeiden.**



14. Nach 15-20 Minuten können Sie das Ergebnis ablesen. **Vorsicht: Nach über 20 Minuten kann das Ergebnis falsch sein.**


Deutung der Testergebnisse

Positiv:

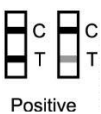

Wenn innerhalb von 15-20 Minuten zwei Farblinien – eine Farblinie im Kontrollbereich (C) und eine Farblinie im Testbereich (T) – erscheinen, so ist der Test gültig und positiv. Das Ergebnis ist als positiv zu werten, egal wie schwach die Farblinie im Testbereich (T) zu sehen ist. Ein positives Ergebnis schließt eine gleichzeitige Infektion mit anderen Krankheitserregern nicht aus.

Negativ:

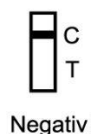

Wenn innerhalb von 15-20 Minuten eine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint, jedoch im Testbereich (T) keine Farblinie zu sehen ist, so ist der Test gültig und negativ. Ein negatives Ergebnis schließt eine virale Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus und sollte bei Verdacht von COVID-19 durch molekulardiagnostische Methoden bestätigt werden.

Ungültig:



Wenn innerhalb von 15-20 Minuten keine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint, so ist der Test ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt	Waschen Sie die Haut mit Wasser ab - sofern Irritationen oder Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin
Nach Augenkontakt	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Unverletztes Auge schützen. Auge weit geöffnet halten beim Spülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Bei Schlucken/Einnehmen	Waschen Sie den Mund mit Wasser aus - sofern Irritationen oder Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin.